

CORONA SCHNELLTEST ANLEITUNG

Siemens Healthcare Test

Hände waschen
oder
desinfizieren!


Vorbereitung:

2 Papiertücher –
eins für den Müll
und das andere als
Unterlage für:

Stäbchen,
Wäscheklammer,
Testpalette und
Tropfkappe



Wäscheklammer
beim ersten Test
mit Namen
beschriften!

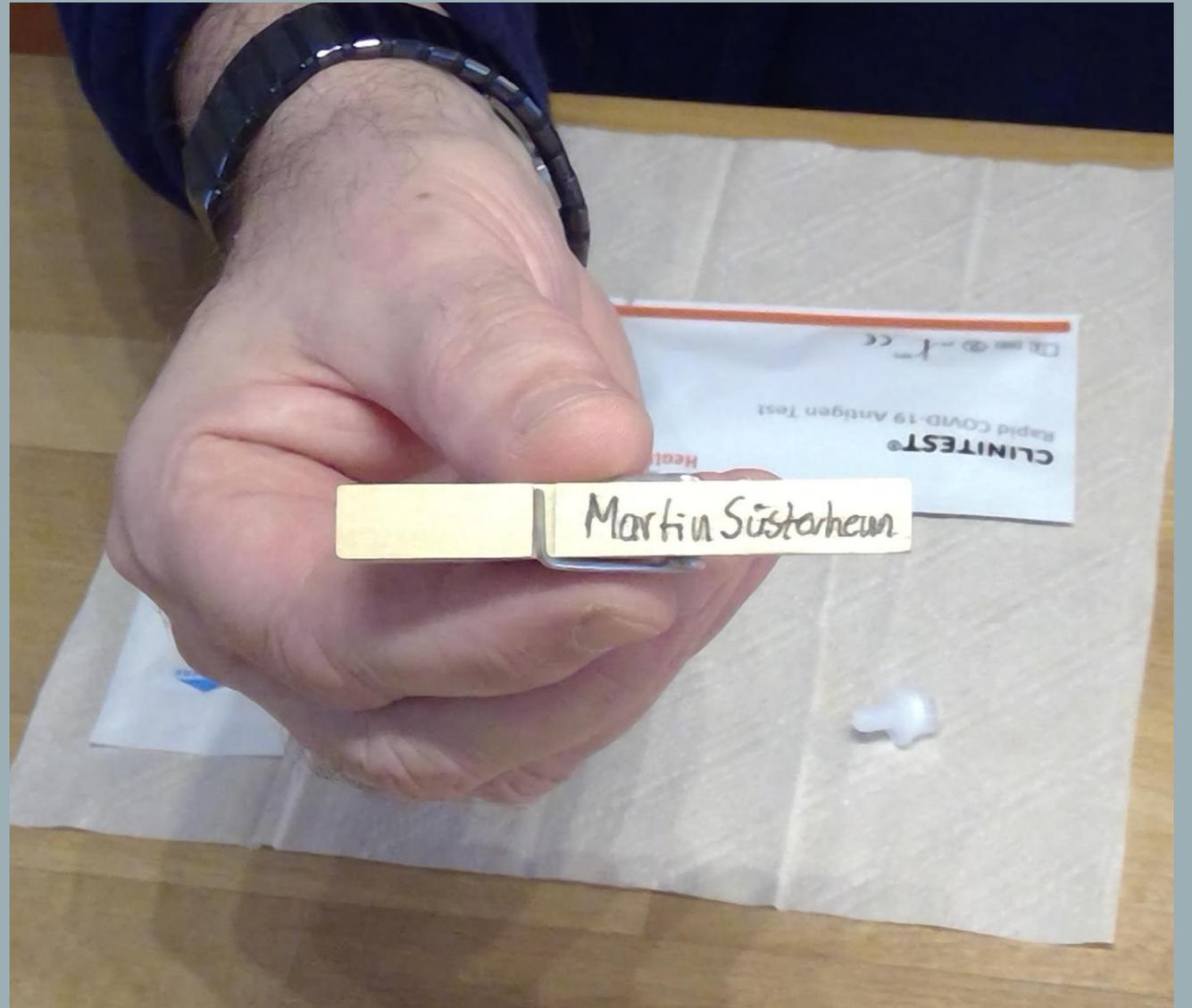


Lehrperson befüllt
die Teströhrchen mit
je 10 Tropfen
Testflüssigkeit!

Die befüllten
Röhrchen werden
an die Schüler*innen
ausgegeben!



Gefülltes
Teströhrchen in die
Wäscheklammer
klemmen!

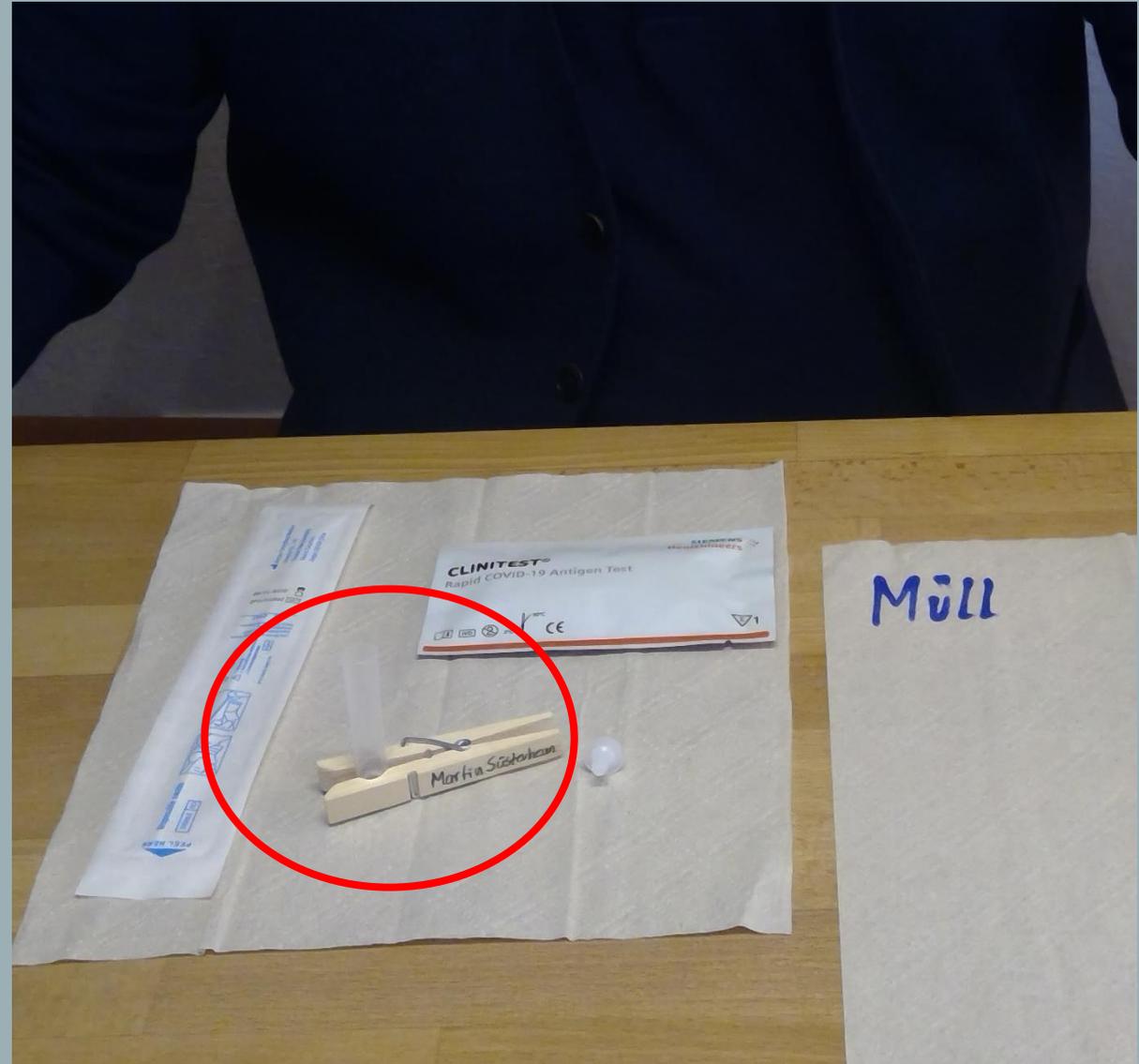

Testpalette und
Stäbchen aus der
Verpackung
herausholen!
Das Stäbchen
wie abgebildet
ablegen!



Die Maske
NUR unter
die Nase
ziehen!



Mit dem Stäbchen
etwa **2 cm tief** in
beiden
Nasenlöchern
5mal rund herum
abstreichen!



Das Stäbchen in
das Röhrchen
stellen!
Danach die Maske
wieder richtig
aufsetzen!




Röhrchen mit dem
Stäbchen aus der
Wäscheklammer
holen!

Das Stäbchen **8mal**
im Röhrchen drehen
und dabei an die
Röhrchen-Innenwand
und den Boden
drücken!




Röhrchen mit dem
Stäbchen wieder in die
Wäscheklammer
klemmen!
Dann 1 Minute stehen
lassen!

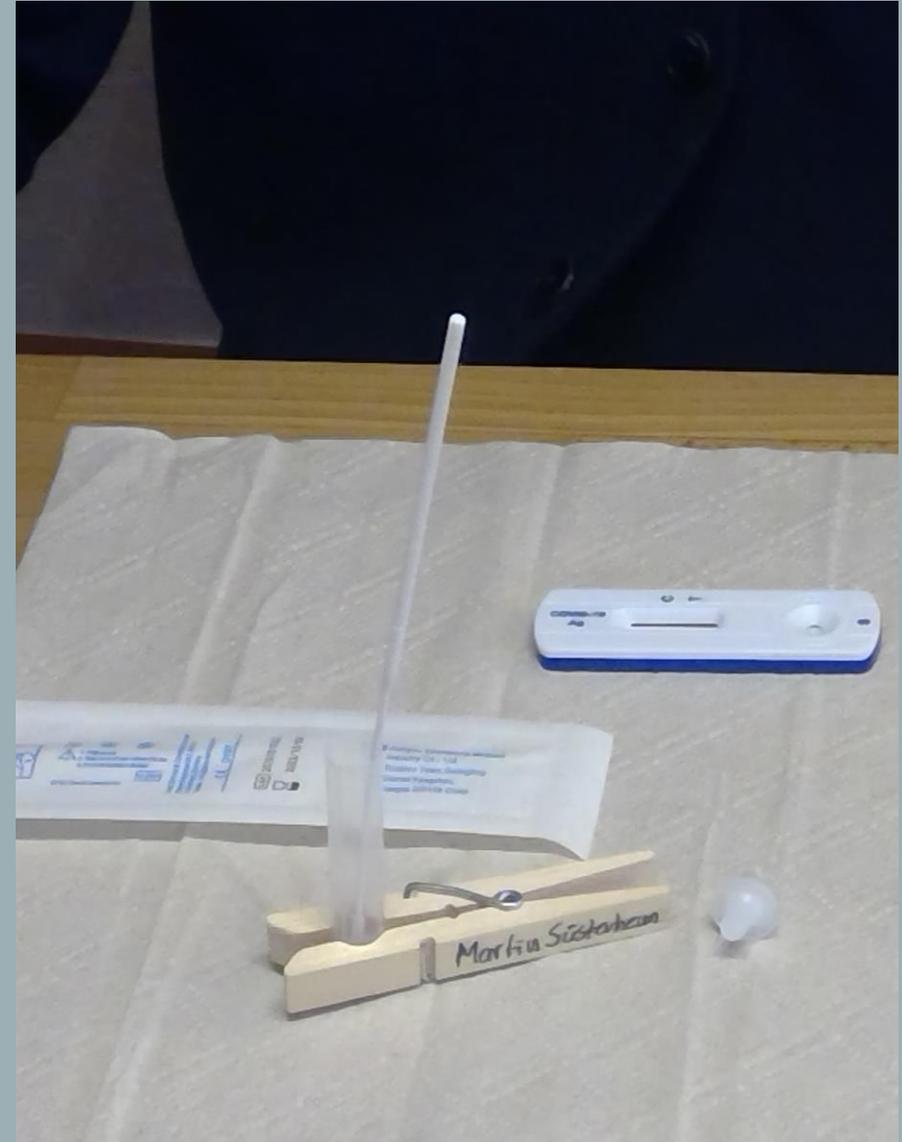

Nach 1 Minute das
Stäbchen zum Müll
legen!

Die Tropfkappe auf
das Röhrchen
setzen!

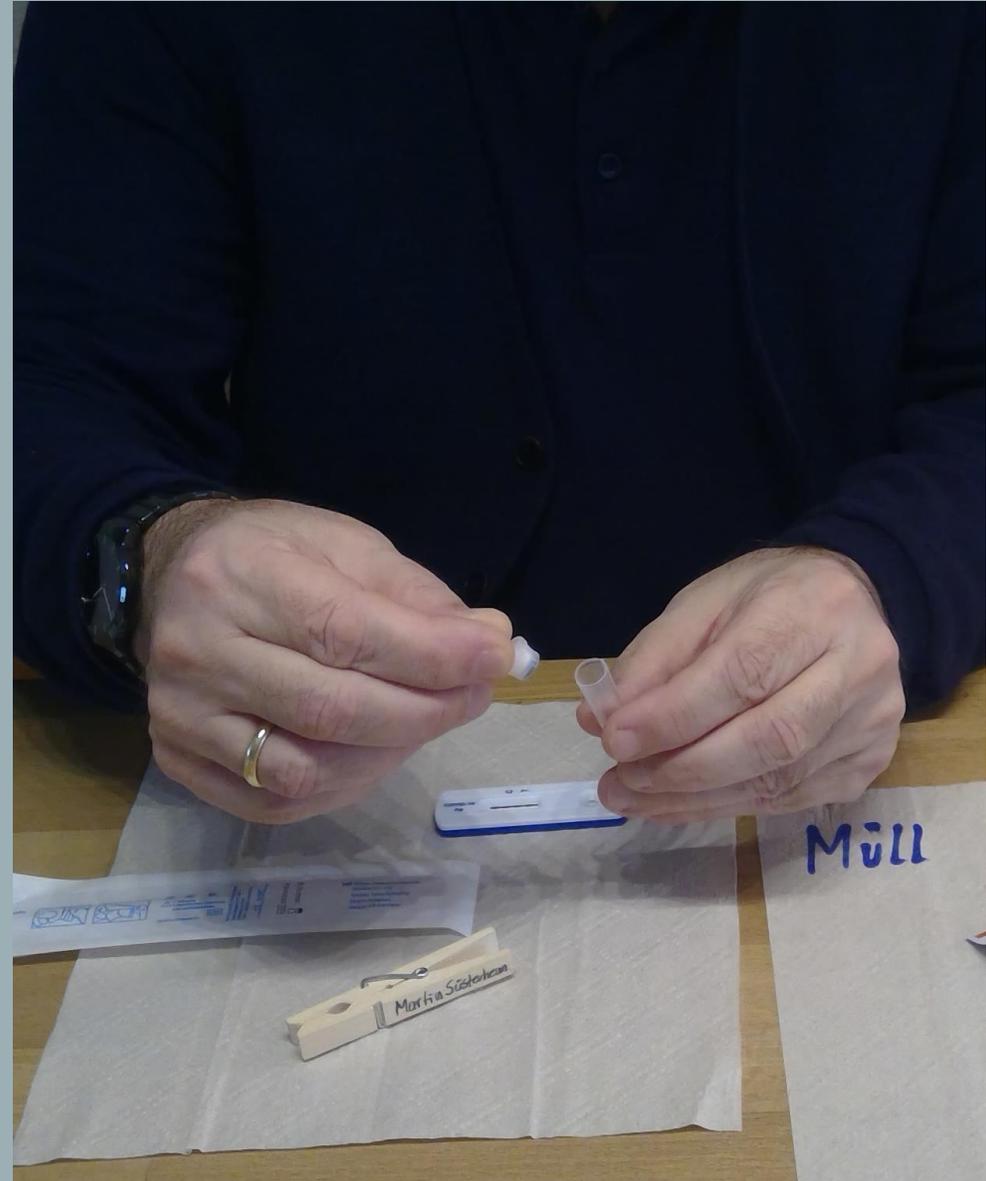

4 Tropfen aus dem Röhrrchen auf das **runde Feld** der Testpalette tröpfeln!





15 Minuten warten!


in der Wartezeit: ...

...in der Wartezeit:
Müll (alles außer der
Testpalette)
zusammenlegen!
Die Wäscheklammer
im Mäppchen
verstauen!



Nach 15 Minuten
das Testergebnis
ablesen!

Bei **positivem oder**
ungültigem Test
der Lehrperson
Bescheid geben!

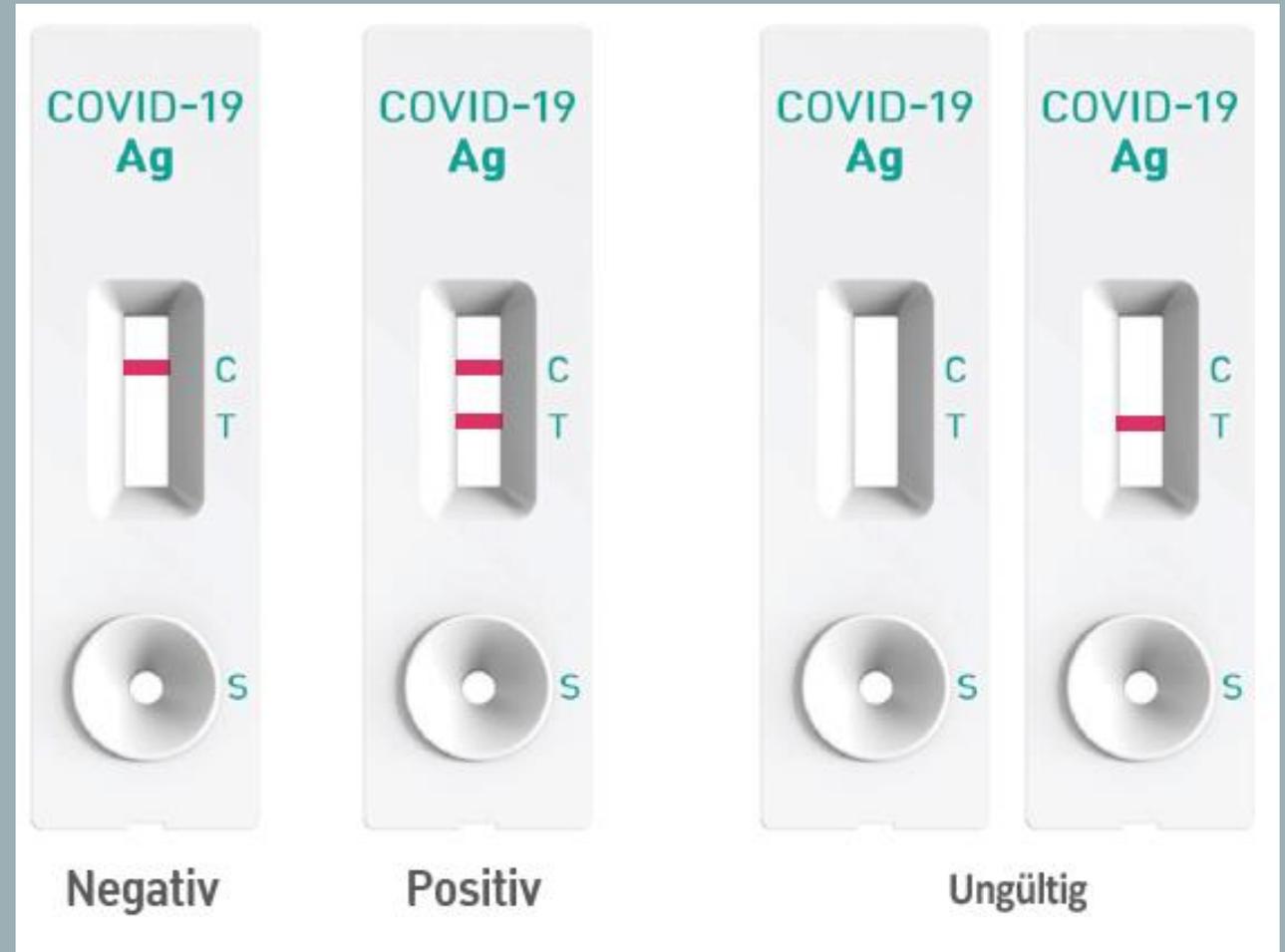

Zum Schluss:
Alles mit den
Papiertüchern
zusammenwickeln
und in den Müllsack
werfen!



Jetzt noch einmal die
Hände waschen oder
desinfizieren –
und fertig!

